








**THUASNE®**

# Ligaflex® Immo 0°

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| <b>fr</b> | Attelle d'immobilisation du genou à 0°.....                 | 4  |
| <b>en</b> | Knee immobilisation splint at 0°.....                       | 4  |
| <b>de</b> | Schiene zur Ruhigstellung des Knies in einem 0°-Winkel..... | 4  |
| <b>nl</b> | Immobilisatiebrace voor de knie op 0°.....                  | 5  |
| <b>it</b> | Tutore di immobilizzazione per il ginocchio a 0°.....       | 5  |
| <b>es</b> | Férula de inmovilización de la rodilla a 0°.....            | 5  |
| <b>pt</b> | Tala para imobilização do joelho em 0°.....                 | 6  |
| <b>da</b> | Immobiliserende knæskinne ved 0°.....                       | 6  |
| <b>fi</b> | Immobilisoiva polvituki, taivutus 0°.....                   | 7  |
| <b>sv</b> | Immobiliseringsskena för knät 0°.....                       | 7  |
| <b>el</b> | Νάρθηκας ακινητοποίησης γονάτου σε κάμψη 0°.....            | 7  |
| <b>cs</b> | Imobilizační ortéza kolene 0°.....                          | 8  |
| <b>pl</b> | Orteza do unieruchomienia kolana pod kątem 0°.....          | 8  |
| <b>lv</b> | Celgala imobilizācijas saite 0°.....                        | 8  |
| <b>lt</b> | Kelio imobilizavimo 0° padėtyje įtvoras.....                | 9  |
| <b>et</b> | Põlve fikseerimise lahas 0° juures.....                     | 9  |
| <b>sl</b> | Opornica za imobilizacijo kolena s kotom 0°.....            | 9  |
| <b>sk</b> | Imobilizačná kolenná ortéza pri 0° uhle.....                | 10 |
| <b>hu</b> | Oldalsínes térdrögzítő 0°-os szög.....                      | 10 |
| <b>bg</b> | Шина за имобилизация на коляно на 0°.....                   | 10 |
| <b>ro</b> | Atelă pentru imobilizarea genunchiului la 0°.....           | 11 |
| <b>ru</b> | Шина для имобилизации коленного сустава под углом 0°.....   | 11 |
| <b>hr</b> | Udlaga za imobilizaciju koljena, 0°.....                    | 12 |
| <b>zh</b> | 0° 膝关节固定夹板.....   | 12 |
| <b>ar</b> | جبيرة لتثبيت الركبة على زاوية صفر درجة.....                 | 13 |



|   |           |  | < 150 cm  | 150 - 175 cm  | > 175 cm  |
|---|-----------|---|---|---|---|
|  | <b>S</b>  | 35 - 45 cm  |  |  | x   |
|   | <b>M</b>  | 45 - 52 cm  | x   |   |  |
|   | <b>L</b>  | 53 - 62 cm  | x   | 50 cm   |   |
|   | <b>XL</b> | 63 - 75 cm  | x   | 60 cm   |   |






Instructions d'utilisation - Instructions for use - Gebrauchsanweisung - Gebruiksaanwijzingen - Istruzioni per l'uso - Instrucciones de uso - Instruções de utilização - Anvisninger vedrørende brug - Käyttöohjeet - Råd vid användning - Οδηγίες χρήσης - Pokyny k používání - Szczegóły użytkowania - Lietošanas instrukcija - Naudojimo instrukcijos - Kasutusjuhised - Navodila za uporabo - Pokyny na používanie - Használati utasítás - Инструкции за употреба - Instrucțiuni de utilizare - Инструкция по эксплуатации - Upute za uporabu - 使用指南 - إرشادات الاستعمال




© Thuasne - 6173001 (2023-07)  
© Studio Caterin

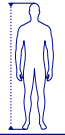**THUASNE**  
120, rue Marius AUFAN  
92300 Levallois-Perret  
France

[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

|  |  |            |   |   |
|--|--|------------|---|---|
|  |  | < 150 cm   | 150 - 175 cm  | > 175 cm  |
|  | <b>S</b>   | 35 - 45 cm |  40 cm | x   |
|  | <b>M</b>   | 45 - 52 cm | x   |  50 cm |
|  | <b>L</b>   | 53 - 62 cm |   |  60 cm |
|  | <b>XL</b>  | 63 - 75 cm |   |   |

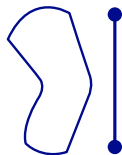

|           |                      |                          |          |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------|
| <b>fr</b> | Taille patient       | Circonférence cuisse     | Hauteur  |
| <b>en</b> | Patient height       | Thigh circumference      | Height   |
| <b>de</b> | Größe des Patienten  | Oberschenkelumfang       | Höhe     |
| <b>nl</b> | Maat van de patiënt  | Dijomtrek                | Hoogte   |
| <b>it</b> | Altezza del paziente | Circonferenza coscia     | Altezza  |
| <b>es</b> | Altura del paciente  | Circunferencia del muslo | Altura   |
| <b>pt</b> | Tamanho do paciente  | Circunferência da coxa   | Altura   |
| <b>da</b> | Patientens højde     | Lårets omkreds           | Højde    |
| <b>fi</b> | Potilaan koko        | Reiden ympärysmitta      | Korkeus  |
| <b>sv</b> | Patientens storlek   | Omkrets lår              | Höjd     |
| <b>el</b> | Μέγεθος ασθενούς     | Περιφέρεια μηρού         | Ύψος     |
| <b>cs</b> | Výška pacienta       | Obvod stehna             | Výška    |
| <b>pl</b> | Rozmiar pacjenta     | Obwód uda                | Wysokość |
| <b>lv</b> | Pacienta augums      | Augšstilba apkārtmērs    | Augstums |
| <b>lt</b> | Paciento dydis       | Šlaunies apimtis         | Aukštis  |
| <b>et</b> | Patsiendi suurus     | Reie ümbermõõt           | Kõrgus   |
| <b>sl</b> | Velikost pacienta    | Obseg stegna             | Višina   |
| <b>sk</b> | Veľkosť pacienta     | Obvod stehna             | Výška    |
| <b>hu</b> | A beteg mérete       | Combkörméret             | Magasság |
| <b>bg</b> | Размер на пациента   | Бедрена обиколка         | Височина |
| <b>ro</b> | Talia pacientului    | Circumferință coapsă     | Înălțime |
| <b>ru</b> | Размер пациента      | Окружность бедра         | Высота   |
| <b>hr</b> | Veličina pacijenta   | Opseg bedra              | Visina   |
| <b>zh</b> | 患者身高                 | 大腿圍                      | 高度       |
| <b>ar</b> | مقاس المريض          | محيط الفخذ               | الارتفاع |

|                      |
|----------------------|
| Immobilisation       |
| Immobilisation       |
| Ruhigstellung        |
| Immobilisatie        |
| Immobilizzazione     |
| Inmovilización       |
| Imobilização         |
| Støtte               |
| Immobilisoi          |
| Immobilisering       |
| Ακιντονόισον         |
| Znehybnění           |
| Unieruchomienie      |
| Imobilizācija        |
| Imobilizavimas       |
| Liikumatuks muutmine |
| Imobilizacija        |
| Imobilizácia         |
| Rögzítés             |
| Обездвижане          |
| Imobilizare          |
| Иммобилизация        |
| Imobilizacija        |
| 固定                   |
| التثبيت              |




1



2



3

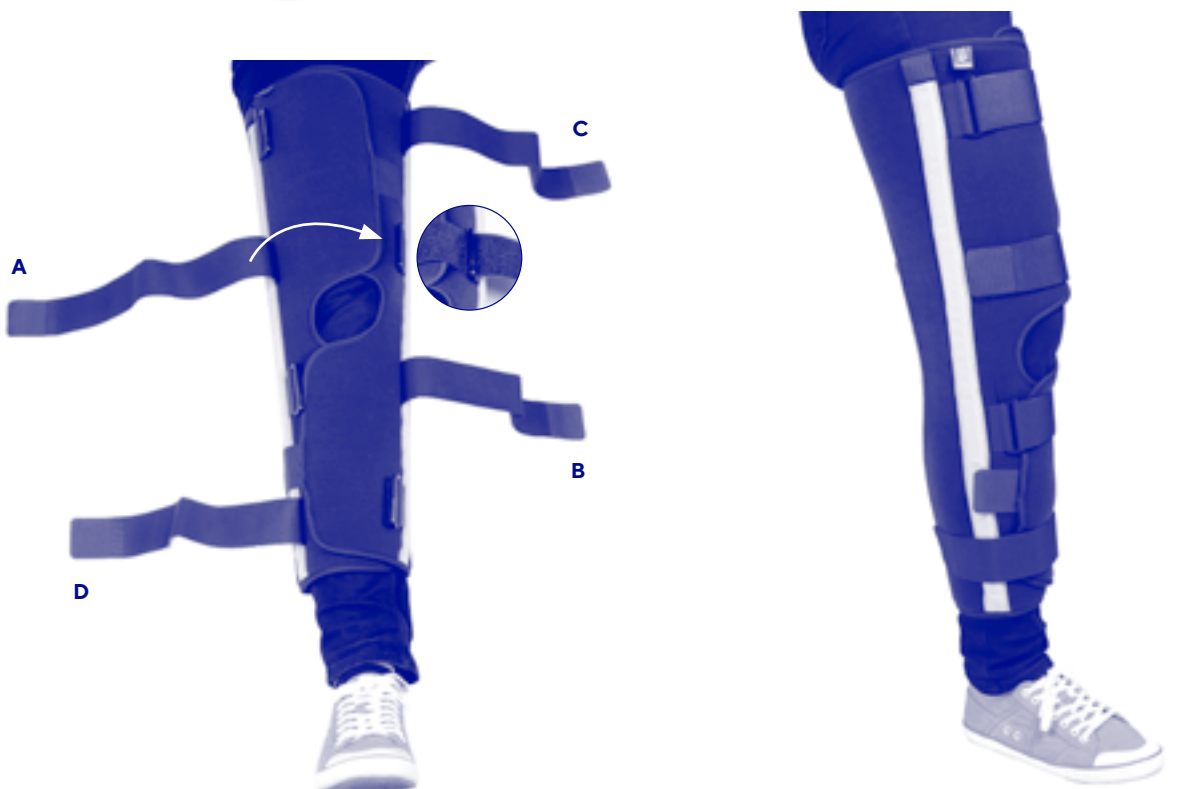





















جئاتر تثبيت الركية بزواوية صفر درجة و 20 درجة.

#### الوصف/الغرض

الجهاز مخصص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة وللمرضى الذين تتوافق قياساتهم مع جدول المقاسات تتكون التجهيزه مما يلي :

- 3 شرائح شفافة عند إجراء الأشعة صلبة قابلة للإزالة.
- 4 أحزمة لاصقة للإغلاق والصيانة.
- تجهيزه واحدة ضد الانزلاق قابلة للإزالة.
- إسفين للحشو لراحة المريض.

منتج ثانى الجانب.

متوفرة بمقاس واحد للإصدار بارتفاع 40 سم (إصدار صفر درجة فقط)، 4 مقاسات للإصدار بارتفاع 50 سم و 3 مقاسات للإصدار بارتفاع 60 سم.

#### التكوين

المكونات المنسوجة: بوليستر- بولى يوريتين - قطن - بولى بروبيلين - البولى أميد - مطاط اصطناعى (SBR).  
المكونات الصلبة : ألومنيوم - البولى أميد.

#### الخصائص/طريقة العمل

تثبيت مفصل الركية بواسطة شرائح صلبة.  
تثبيت كلى على صفر درجة أو على 20 درجة.  
إغلاق وتثبيت قابلان للتعديل بواسطة الأحزمة اللاصقة ذاتياً.

#### دواعى الاستعمال

التثبيت ما بعد الجراحى.

التثبيت ما بعد الرضوض.

آلم الركية.

#### موانع الاستعمال

لا تستخدم المنتج إذا كان التشخيص غير مؤكد.

لا يستخدم فى حالة وجود حساسية معروفة لاي من مكوناته.

لا تضع المنتج على اتصال مباشر مع جلد مصاب بجرح أو جرح مفتوح بدون ضمادة مناسبة  
لا تستخدم فى حالة وجود تاريخ انسداد خثارى وريدى كبير دون علاج للوقاية من الجلطات.

لا تستخدم فى حالة الكسور غير المستقرة أو كسور الجزء السفلى من قصبة الساق أو الشظية أو كسور الجزء العلوى من الفخذ

#### الاحتياطات

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا.

اختر المقاس الملائم للمريض بالرجوع إلى جدول المقاسات.

يوصى بأن يشرف أخصائى رعاية صحية على وضعه فى المرة الأولى.

يجب أن يتم استخدام أي جهاز طبي من قبل طفل تحت إشراف شخص بالغ أو أخصائى رعاية صحية

التزم بدقة بالوصفة الطبية وبيروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائى الرعاية الصحية الخاص بك

هذا المنتج موجه لعلاج مرض محدد ويجب أن تقتصر مدة استعماله على هذا العلاج

يوصى بتقييم خطر تشكّل خثاره الدم الوريدية قبل تثبيت حركة الركية.

يجب الاعتماد دائماً على رأي مختص في الرعاية الصحية.

لأسباب تتعلق بالنظافة والأداء، لا تستخدم الجهاز مجدداً مع مريض آخر.

يوصى بإحكام تثبيت الجهاز بشكل مناسب من أجل ضمان الدعم/التثبيت دون إعاقة الدورة الدموية.

فى حالة الإصابة السابقة باضطرابات وريدية أو لمفاوية، استشر أخصائى رعاية صحية

فى حالة الشعور بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو تغير حجم عضو الجسم، أو الأحاسيس غير الطبيعية أو تغير لون الأطراف،

قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائى رعاية صحية

إذا تغير أداء التجهيزه، قم بإزالتها واستشر أخصائى الرعاية الصحية.

قد يسبب التثبيت المطول أحياناً فقدان توتر العضلات.

لا تستخدم الجهاز أثناء قيادة سيارة.

لا تستخدم الجهاز فى حالة وضع منتجات معبئة على الجلد (الكريمات والمرامه والزيت والهلام واللصقات وما إلى ذلك)

#### الآثار الثانوية غير المرغوب فيها

يمكن أن يتسبب هذا الجهاز فى تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، حروق، بثور...) أو حتى جروح متفاوتة الشدة.

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة فى الدولة العضو التى يوجد فيها المستخدم /أو المريض بأى حادث خطير يتعلق بالتجهيزه

#### طريقة الاستعمال/الوضع

اختر ارتفاع الجبيرة، ثم مقاسها.

يتم القياس عند أكبر حجم للفخذ.

يوصى بأن يشرف أخصائى رعاية صحية على وضعه فى المرة الأولى.

يوصى بارتداء التجهيزه مباشرة على الجلد، ماعدا فى حالة وجود موانع للاستعمال.

- افتح الجبيرة وضعها بشكل مسطح ❶
- ضع الجبيرة وهى مفتوحة أسفل الساق ❷، الطرف الأوسع نحو الجزء العلوي من الساق.

يجب أن يكون مركز الرضفة فى المنطقة المجرّفة.

ملحوظة : يجب ألا يعيق الجزء العلوي من الجبيرة انثناء الساق عند ثنية الفخذ

- تشكيل الشرائح: إذا لزم الأمر، من الممكن تشكيل الشرائح لتجنب نقاط الضغط المحتملة أو تحرك الجبيرة.

سلط ضغطاً خفيفاً فى الاتجاه المرغوب فيه.

كرر العملية على الشرائح الأخرى إذا لزم الأمر.

إذا كانت الشرائح بحاجة إلى مزيد من التشكيل، استشر أخصائياً صحياً.

- مرر الأحزمة ذاتية اللصق فى الحلقات.

أحكم ربط الأحزمة بالترتيب الموصوف (A, B, C, D) ❸

بمجرد غلق جميع الأحزمة، أعد ضبط إحكام ربطها.

إذا لزم الأمر، قلّل طول الأحزمة بقطع الأطراف باستخدام مقص.

#### الصيانة

منتج قابل للغسل حسب الشروط الموجودة فى هذا الدليل والملصقات.

يمكن غسله يدوياً. أغلق الماسكات الذاتية قبل الغسل. قم بإزالة الشرائح قبل الغسل. يمكن غسل الشرائح باستخدام قطعة قماش رطبة.

لا تستخدم المنظفات أو المنعمات أو المنتجات القوية (المنتجات المضاف إليها كلور...). يتم عصر المنتج عن طريق الضغط. يتم التجفيف بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...). يتم التجفيف على سطح مسطح مستوي

#### التخزين

يتم تخزينه فى درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه فى عبوته الأصلية

#### التخلص

تخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.

احتفظ بهذا الدليل.






[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)

**UK  
CA**

**UK Responsible Person (UKRP):**

Thuasne UK Ltd  
Unit 4 Orchard Business Centre  
North Farm Road  
Tunbridge Wells TN2 3XF,  
United Kingdom

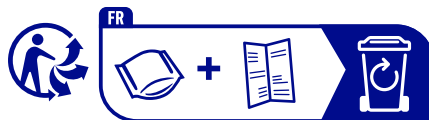

Réserve pour labels certif. papier



À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC



avec ou sans imprim'vert en fonction  
du lieu d'impression